

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Sistema de Gestión Integrado

VERSIÓN:

01

PÁGINA:

1 de 1

NOMBRE

TUBO PLASTICO AL VACIO CON GEL SEPARADOR

MARCA

PREMIER- TUBES M&H

DUEÑO DE LA MARCA

Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd

PAÍS DE ORIGEN DEL PRODUCTO

CHINA

FORMA DE PRESENTACIÓN

PACK x 100 UNIDADES

ESPECIFICACION TECNICA

Uso:

Tubo para extracción de sangre por vacío. Estéril y de un solo uso, de tapa amarilla.

Para determinaciones en química, inmunología y serología en suero.

Recubierto con partículas microscópicas de sílice secadas por pulverización ultrasónica que activan la coagulación de la sangre obtenida.

Contienen un gel polimérico inerte que separa el suero de la sangre coagulada durante la centrifugación, evitando la contaminación del suero

Mezcle suavemente el tubo de recolección de sangre invirtiéndolo de 5 a 6 veces inmediatamente para activar la coagulación después de la extracción de sangre

Dejar reposar el tubo por 30 minutos o hasta que se forme el coágulo

Centrifugación: 1800-2200 g durante 8-15 minutos a 18-25° C.

Características:

- ❖ Tubo plástico PET al vacío de 13 x 100 mm
- ❖ Capacidad 5ml
- ❖ Con gel separador
- ❖ Gel tipo monómero, transparente.
- ❖ Sin aditivo, con activador de la coagulación (partículas de sílice esparcidas por la pared del tubo).
- ❖ Paredes internas siliconizadas para evitar adherencias de los hematíes.
- ❖ Tapon de color amarillo.

Muestra:

Suero

Condiciones de almacenamiento:

A temperatura ambiente

Empaque:

Envase inmediato: Bandeja de Tecnopol, revestida de un film de polietileno.

Envase mediato: caja de carton.

Certificado de Calidad:

ISO 13485:2003

